



DEPPERLER

Signature of excellence

SCHLEIFMETHODEN




WARUM INSTRUMENTE WÄHLEN, DIE SICH SCHLEIFEN LASSEN?

In einer Studie wurden Deppeler-Instrumente (schleifbare) und Instrumente, die nicht geschliffen werden können, getestet und verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass nach 1000 Züge auf Dentin und fünffacher Aufbereitung ca. 75% ihrer Effizienz eingebüßt haben.

Wenn der Anwender zu diesem Zeitpunkt ein Instrument verwendet, das nicht nachgeschliffen werden kann, verliert das stumpfe Instrument weiter an Effizienz.

Wenn der Anwender ein Deppeler-Instrument hat, kann die Schneide geschliffen werden, **um optimale Schärfe und Komfort zurückzugewinnen.**

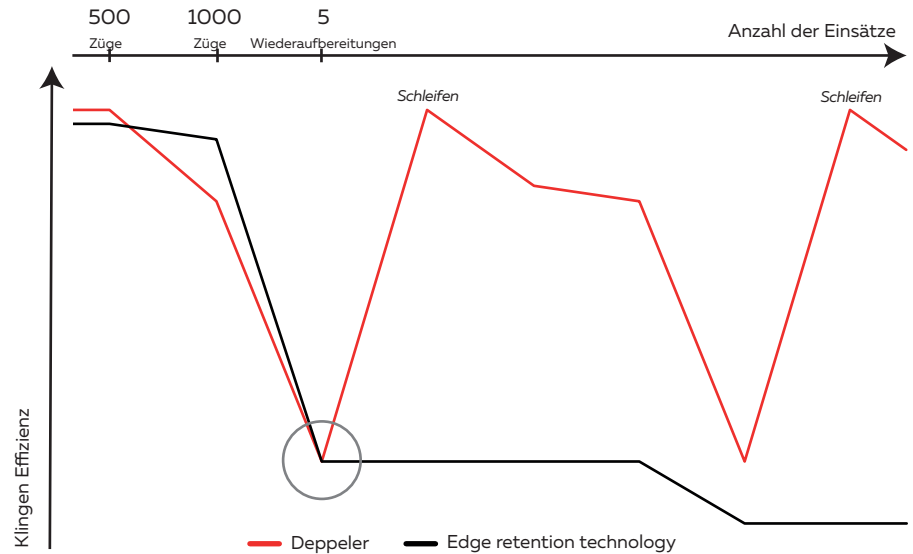

Schmidlin et. al.: In vitro evaluation of 3 curettes with edge retention technology after extended use. SSO Journal 119: 1200-1207. (12/2009)

Flexibilität

Die Arbeitsenden schleifbarer Instrumente sind flexibler und brechen im Mund des Patienten weniger leicht.

Einsparungen

Schleifbare Instrumente müssen weniger häufig ersetzt werden. Ihre Kosten sind auf längerer Sicht niedriger.

Effizienz

Eine blanken Stahlkante ist effizienter als eine beschichtete Kante.

Umwelt

Instrumente aus Vollstahl müssen nicht nur seltener gekauft werden, sondern sind auch leichter zu recyceln.

SCHLEIFMETHODEN

Halten Sie die scharfen Kanten Ihrer Scaler und Küretten bis zum Ende ihrer Lebensdauer.
Mit Deppeler's narrensicheren Easy Sharp Methoden schärfen Sie Ihre Instrumente einfach und effektiv, ohne Facetten, gezähnten Klingen, und mit sauberen Schnittflächen.




MANUELL

Natursteine



Arkansas Hard Black
ESS1
Standardschleifen

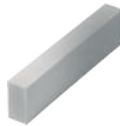

Arkansas Translucent
ESS3A
Feinste Qualität
Schnelleres Schließen
und bessere
Ergebnisse



Silicon Carbide
ESS4
Für Titan-Instrumente
und sehr stumpfe
Stahlinstrumente



MIT HILFE EINER SCHABLONE

Easy Sharp Coach

ESC

Konzipiert für visuelle Führung und einfache Kontrolle des Winkels.
1 coach für Universal-Küretten und Scalers, 1 coach speziell für Gracey-Küretten.
Für Instrumente aller Marken.

Easy Sharp Coach
Verwendung



MIT EINER MASCHINE

Easy Sharp Device

ESD

Entwickelt für maximale Präzision des Schärfwinkels und optimale Kontrolle der Bewegung.
Neuwertige Schärfe (wie fabrikneu).
Für Deppeler Instrumente.

Easy Sharp Device
Verwendung



Bestellinformation

EASY SHARP COACH

Ref. ESC

enthält:

2 Coaches (1 Universal und 1 Gracey)
1 Arkansas Hard Black Stein ESS1

Ref. ESCPLUS

enthält:

2 Coaches (1 Universal und 1 Gracey)
1 Arkansas translucent Stein ESS3A

EASY SHARP DEVICE

Ref. ESD

enthält:

Maschine
1 Arkansas Hard Black Stein ESS1

Ref. ESDPLUS

enthält:

Maschine
1 Arkansas translucent Stein ESS3A

Wir empfehlen, Ihre Instrumente einmal alle 5 bis 8
Behandlungen zu schleifen.



WWW.DEPPERLER.CH

f DEPPELERSA | @ DEPPELER_INSTRUMENTS



DEPPERLER

Signature of excellence