

Montage des manchons ADEP

Préparer le matériel :

1. Récipient
2. Benzine médicinale (en vente en droguerie ou en pharmacie)
3. Brucelle
4. Chiffon
5. Isolant de câble électrique
6. Instrument
7. Manchons ADEP



Monter les ADEP :

1. Plonger les ADEP dans la benzine médicinale. Les laisser reposer entre 20 et 45 secondes. Attention : 45 secondes maximum, pour un montage optimal.
2. Récupérer l'ADEP avec une brucelle, l'égoutter un peu, puis l'essuyer sur le chiffon.
3. Glisser le morceau d'isolant sur la pointe afin de protéger l'ADEP.
4. Tenir l'ADEP selon l'image, le glisser en suivant la courbure de l'instrument. Bien appuyer avec l'annulaire sur l'arrière de l'instrument afin de suivre la courbure.



Puis, recommencer la procédure pour l'autre côté.



Une fois montés, veillez à ce que les ADEP soient bien positionnés (voir images ci-dessous).



Cette façon de procéder garantit un montage stable sur toute la durée de vie de l'instrument. Les ADEP ne doivent pas être réutilisés sur d'autres instruments.