


Montaggio dei manicotti ADEP

Preparare il materiale

1. Recipiente
2. Benzina medicinale
(in vendita presso drogherie o farmacie)
3. Pinzetta
4. Tovaglietta
5. Isolante per cavi elettrici
6. Strumenti
7. Manicotti ADEP

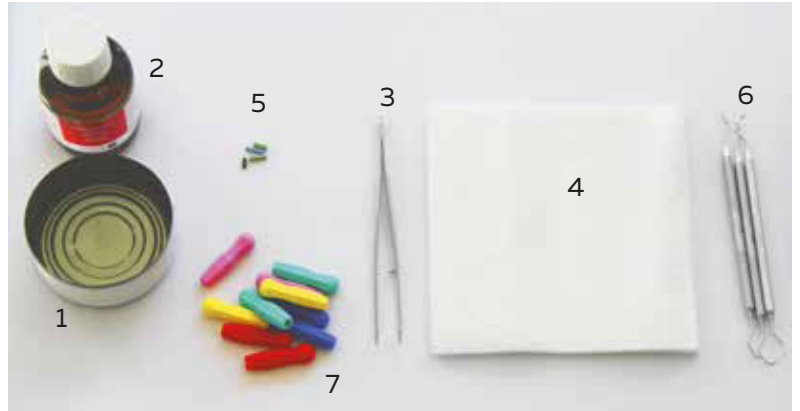

Montare gli ADEP

1. Immergere gli ADEP nella benzina medicinale e lasciare a bagno tra i 20 e i 45 secondi.
Attenzione: i migliori risultati si ottengono con un massimo di 45 secondi di immersione.
2. Recuperare gli ADEP con una pinzetta, scuotere un po' per eliminare l'eccesso di liquido, e far asciugare gli ADEP sul tovagliolo di carta.
3. Rivestire la punta dello strumento con un pezzo d'isolante per cavi elettrici per proteggere l'ADEP
4. Tenere l'ADEP tra le dita come indicato nell'immagine e farlo scorrere verso il manico seguendo la curvatura dello strumento. Premere bene con l'anulare per mantenere la curvatura dell'ADEP durante il suo inserimento.



Ripetere la procedura per il secondo lato.



Una volta montati, verificare che gli ADEP siano ben posizionati. Vedere le immagini qui sotto.



Questa procedura garantisce un montaggio stabile per tutta la durata dello strumento.
 Gli ADEP non devono essere riutilizzati su altri strumenti.